

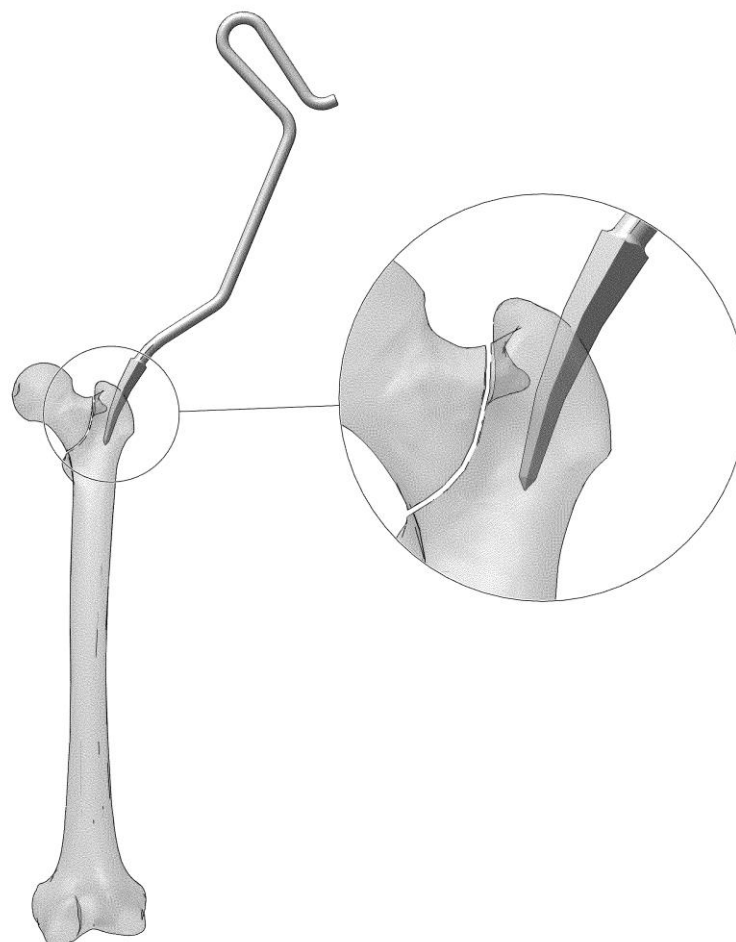


**ROTEIRO PARA INSTRUMENTAÇÃO DE HASTE INTRAMEDULAR
PARA FÊMUR PROXIMAL**

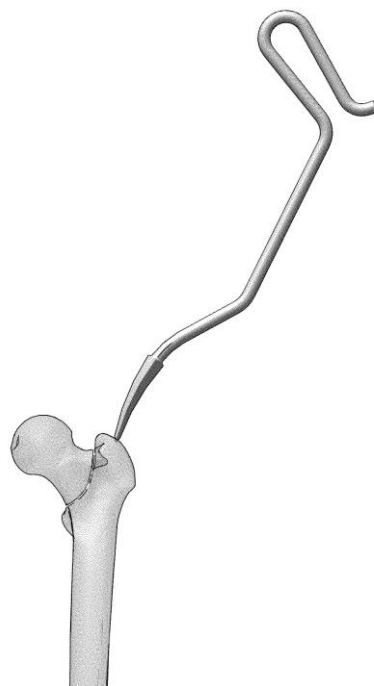

Punção Inicial

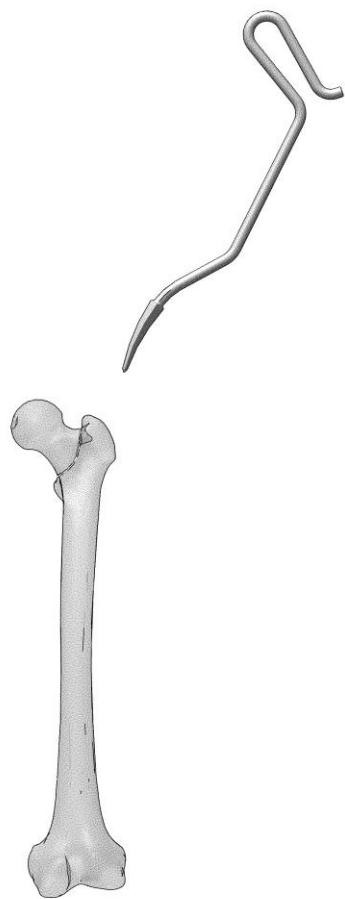

PERFURADOR INICIAL (1453)




Fresagem Inicial e Passagem do Fio guia com Oliva



PROTETOR DE PELE (1430) | FRESA CANULADA Ø16mm (2421) | EMPURRADOR DE FIO (1428) | FIO GUIA Ø3x587mm




Montagem do Guia e Introdução da Haste

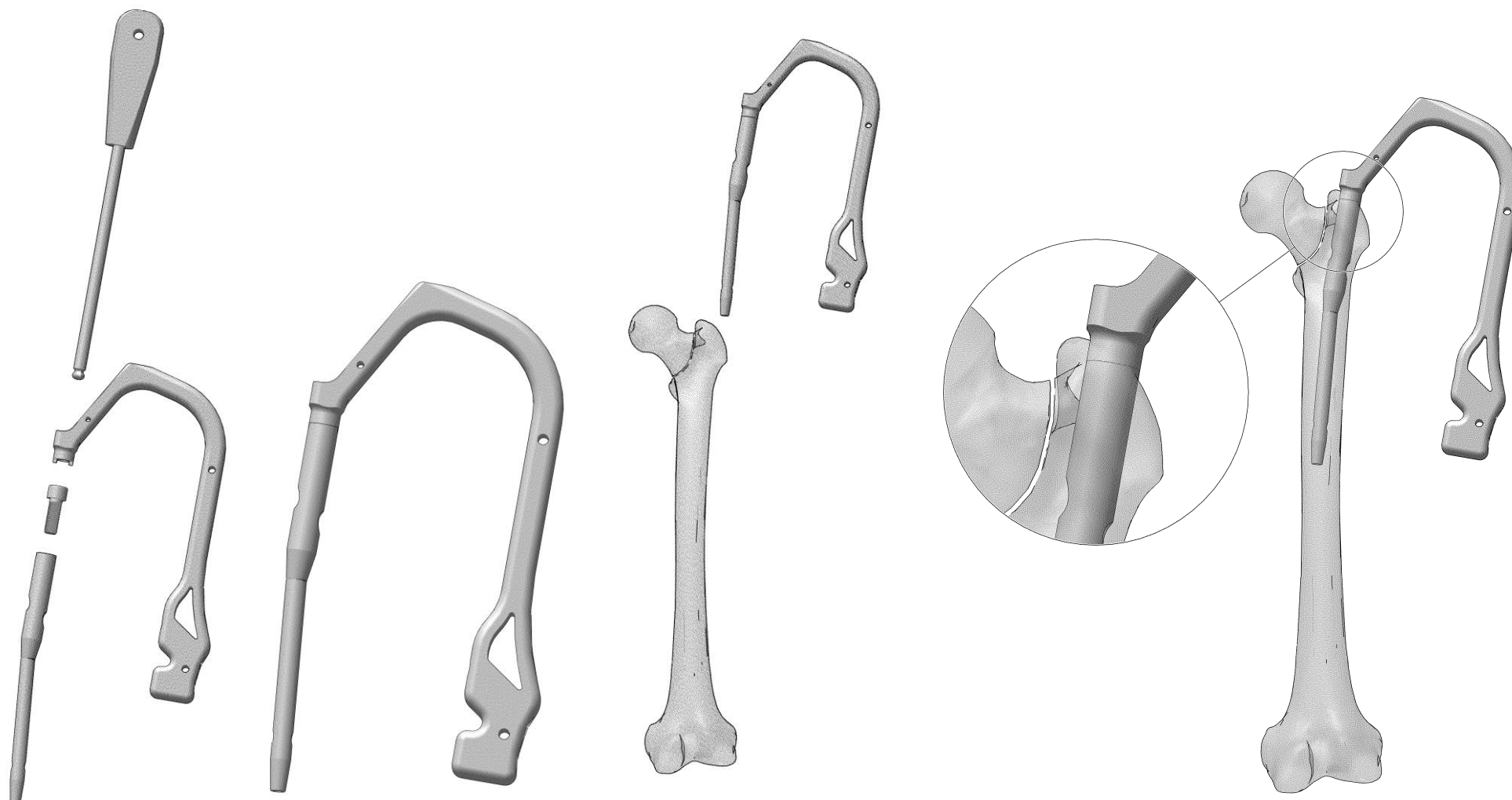

GUIA (3100) | PINO FIXAÇÃO GUIA / HASTE (91366) | CHAVE HEXAGONAL SW. 8mm (91365) | IMPACTOR FINAL (1424)





Passagem do Fio guia no trajeto cefálico e medição

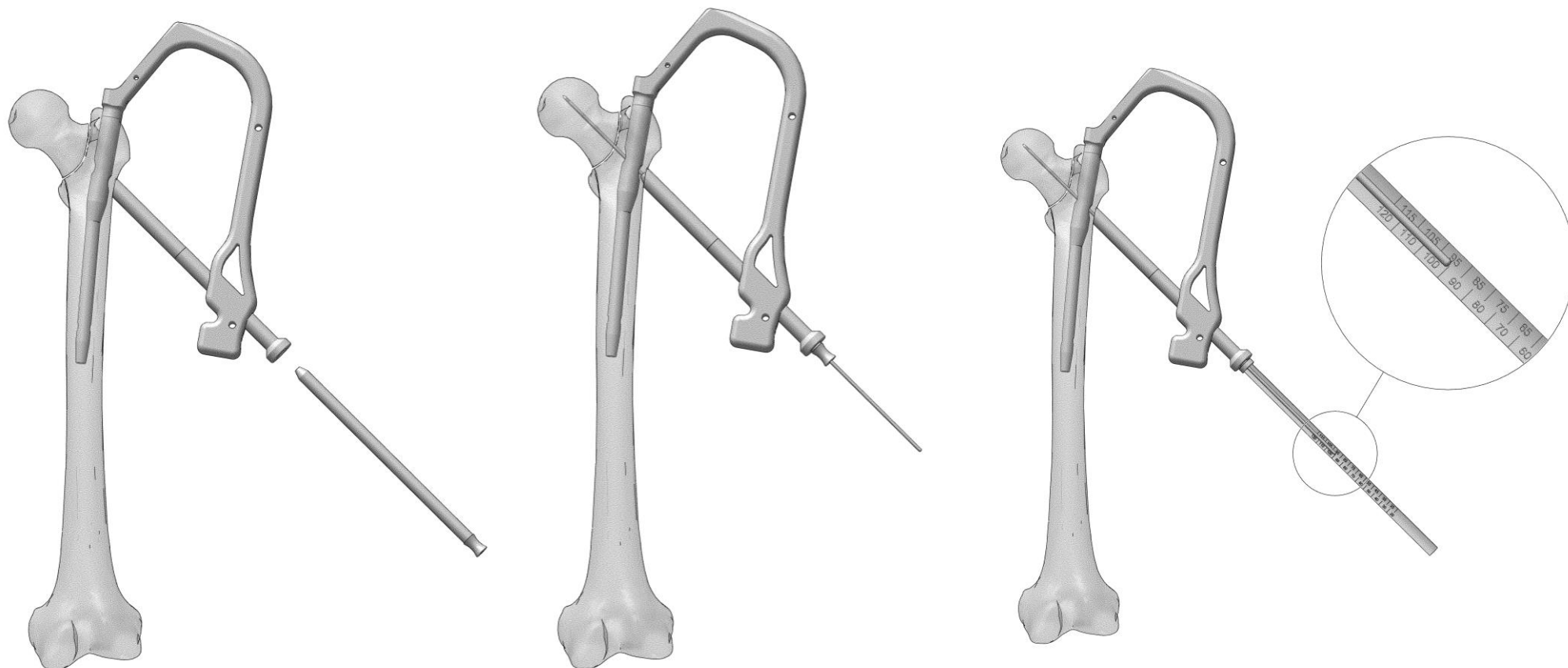

CANULA Ø13mm (91377) | GUIA P/ FIO Ø2,5mm (91376) | FIO GUIA Ø2,5x400mm (31106) | MEDIDOR P/ FIO (2422)





Bloqueio Cefálico - Perfuração da cortical lateral (uso de motor em baixa rotação)

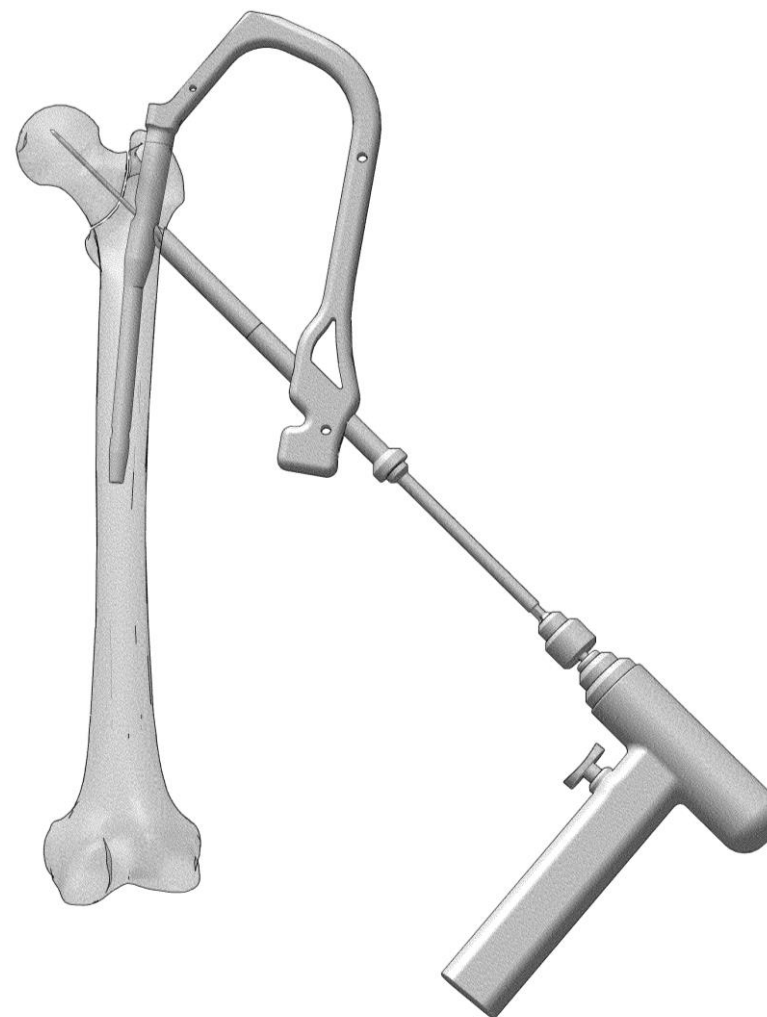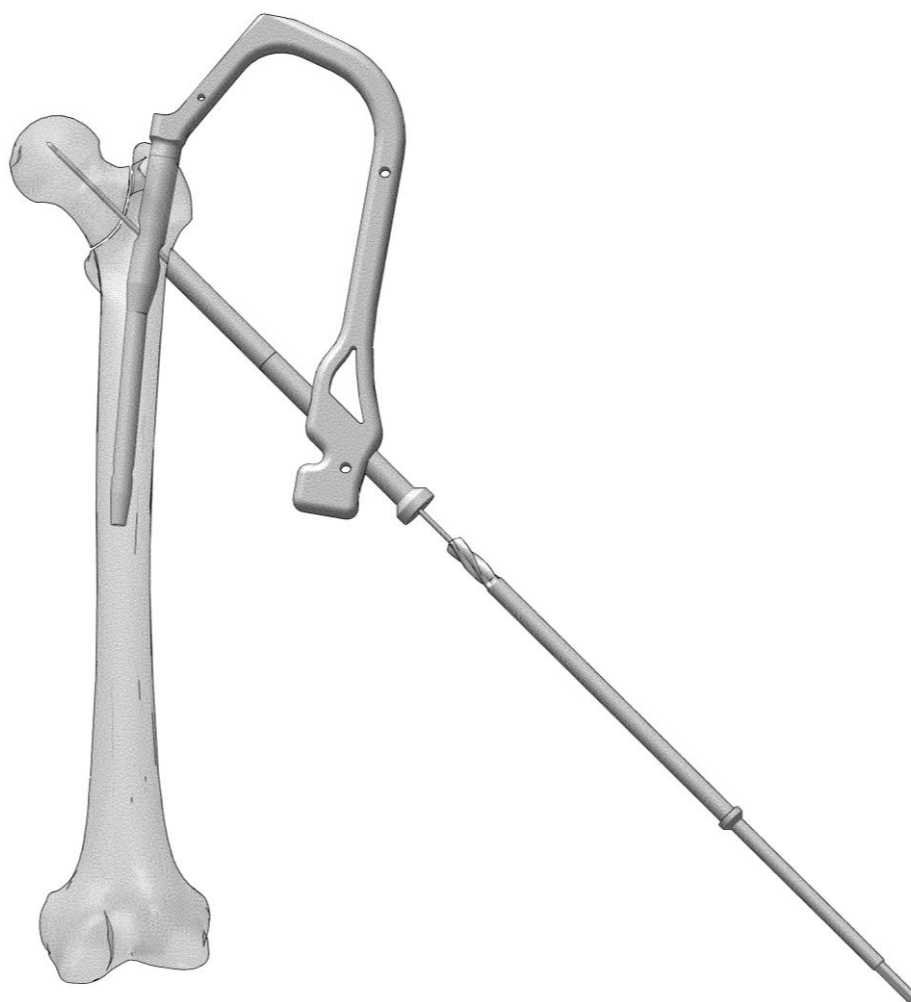

CANULA Ø13mm (91377) | FIO GUIA Ø2,5x400mm (31106) | FRESA CANULADA Ø10mm (91374)




Alargamento pelo Colo do Fêmur (fresagem manual)

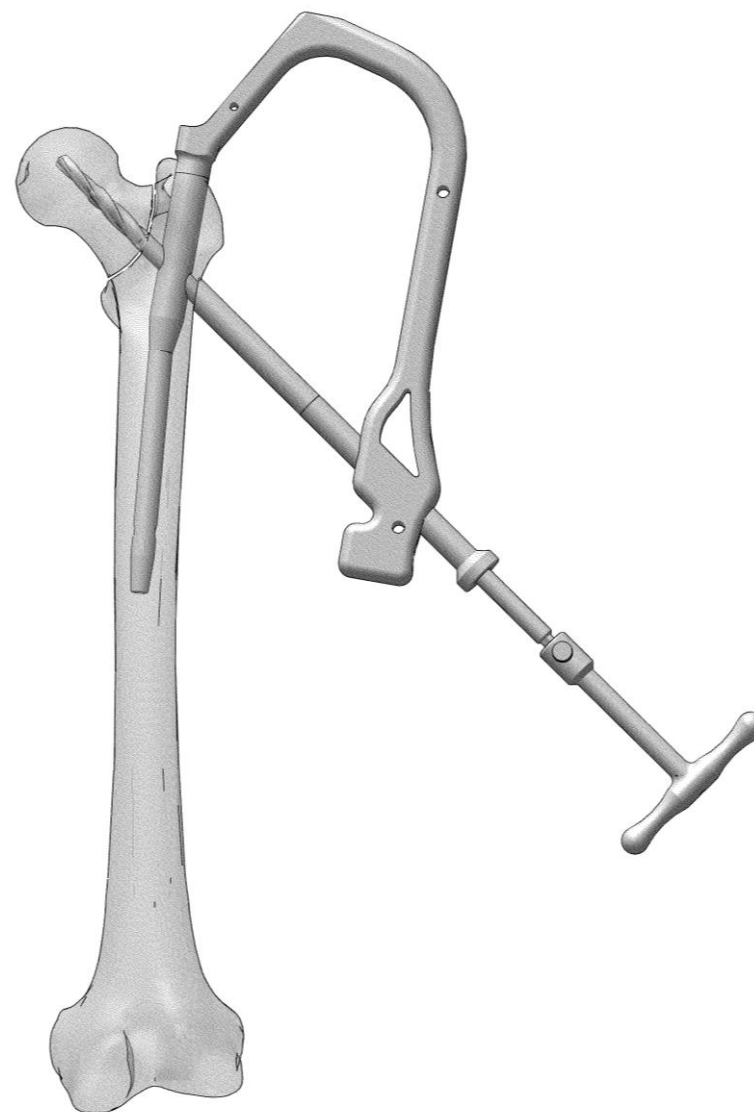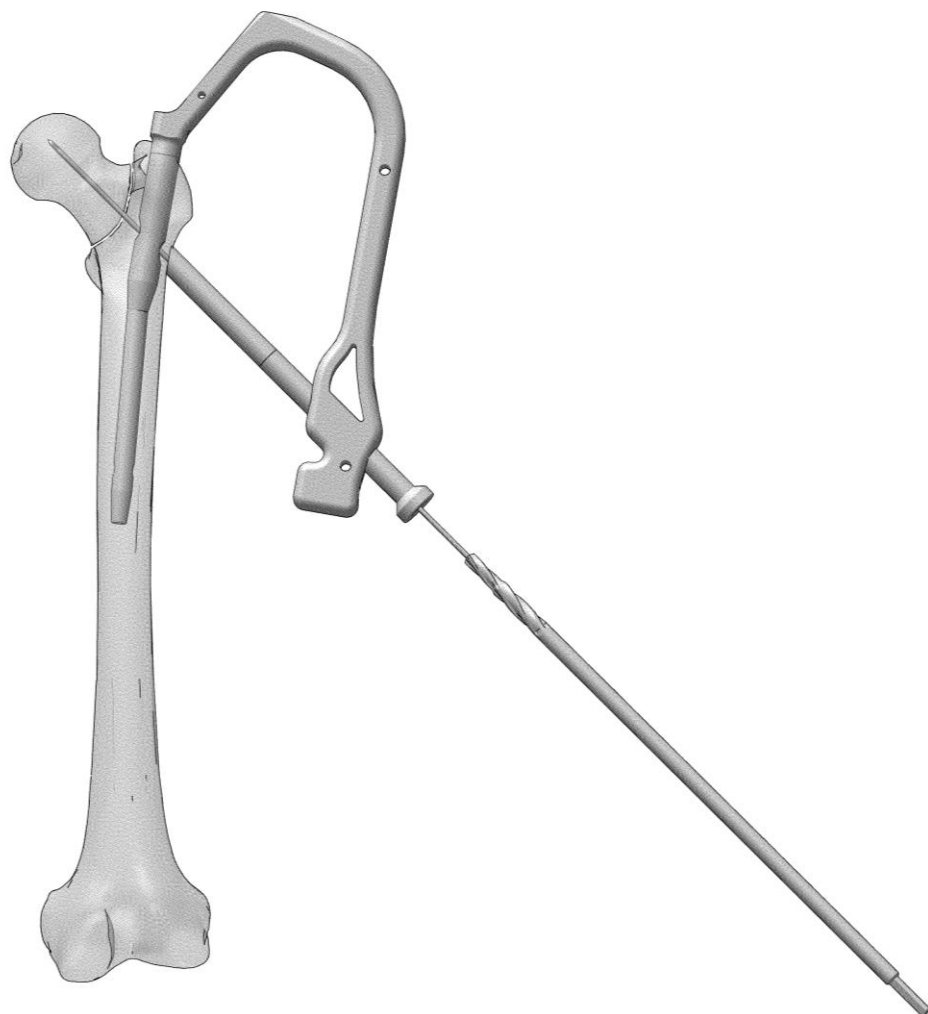

CANULA Ø13mm (91377) | FIO GUIA Ø2,5x400mm (31106) | FRESA CANULADA Ø7 à 9mm (91375) | CABO "T" PARA FRESA (2411)




Montagem e Colocação do Pino Cefálico

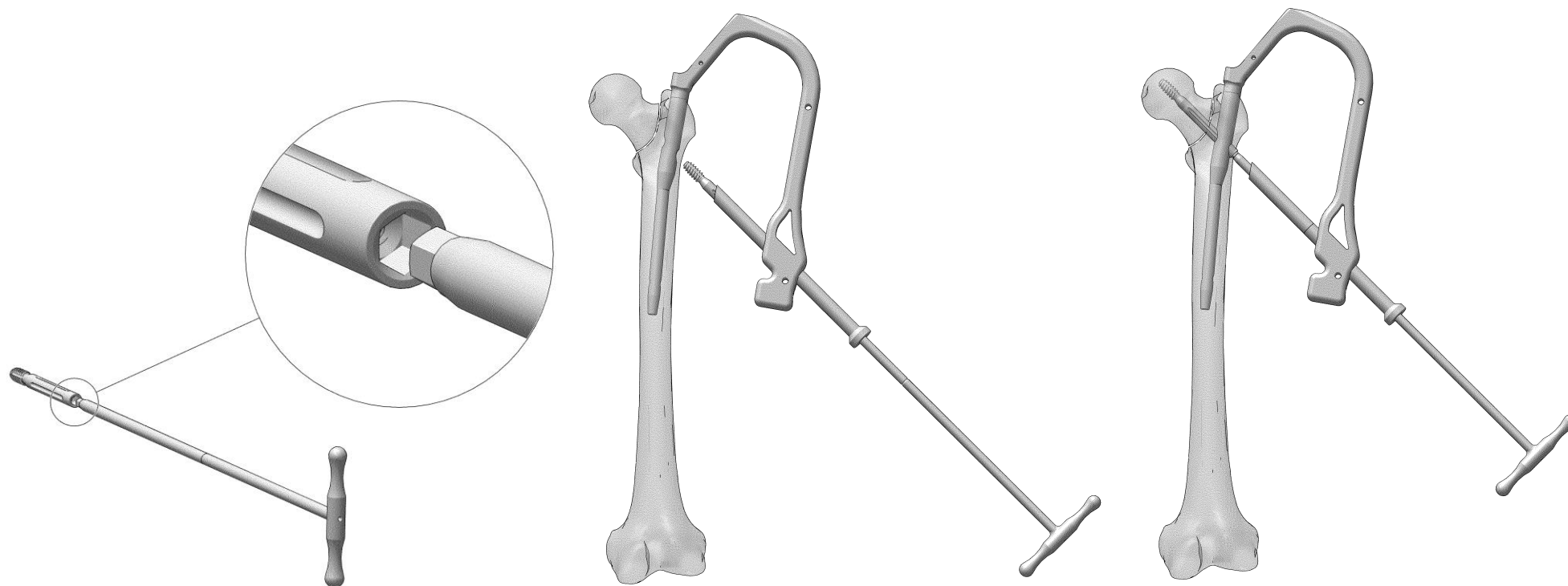

CANULA Ø13mm (91377) | FIO GUIA Ø2,5x400mm (31106) | CHAVE HEXAGONAL SW. 6mm (91372)





Detalhes da posição final da chave introdutora e do Pino Cefálico

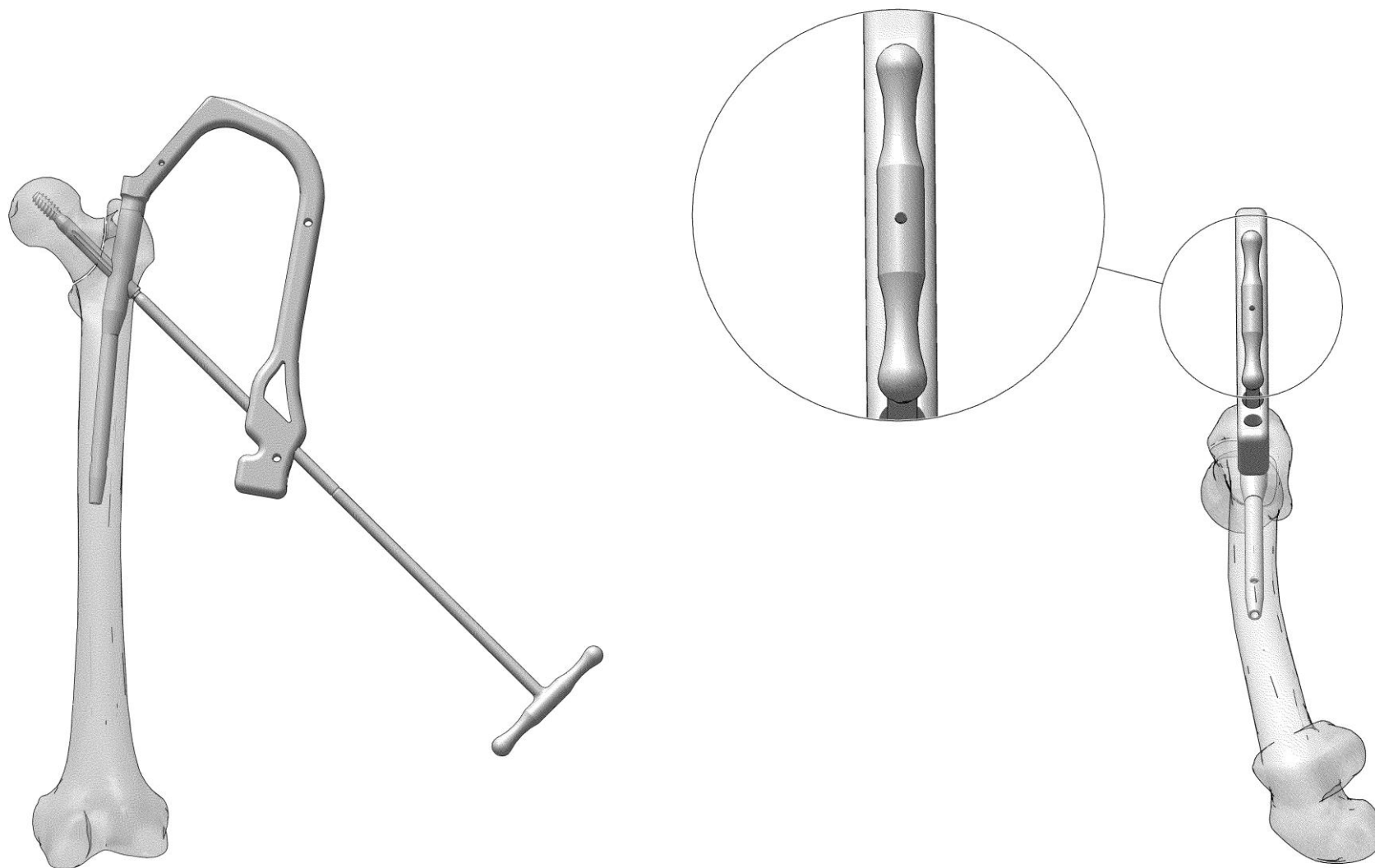





Bloqueio Distal - Perfuração da cortical lateral (uso de motor em baixa rotação)

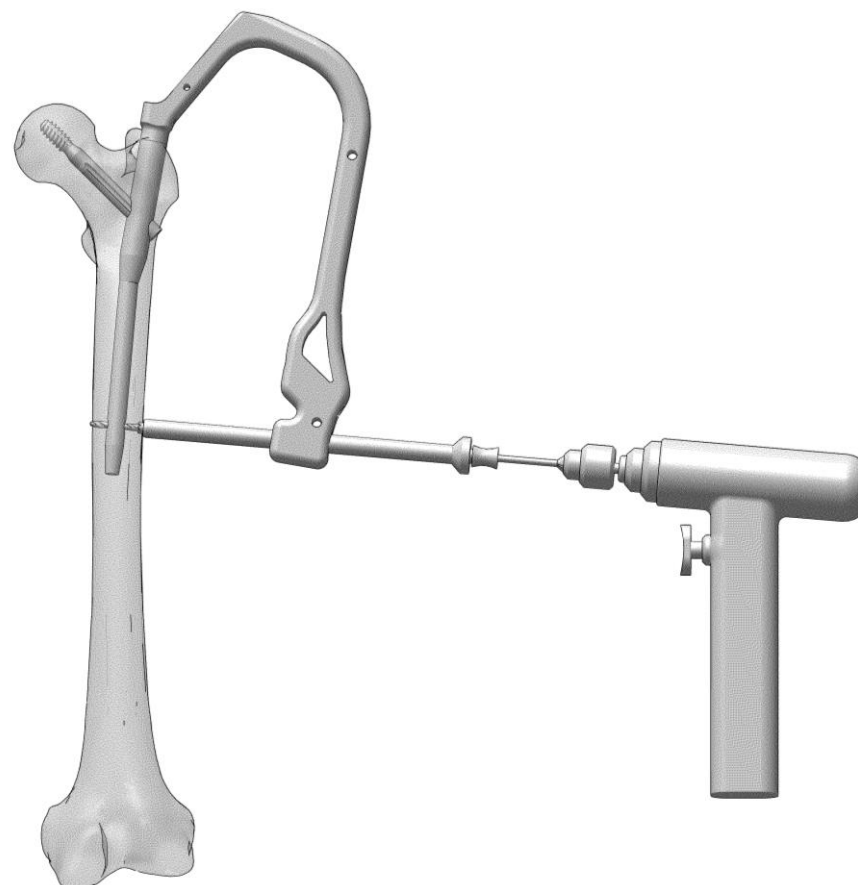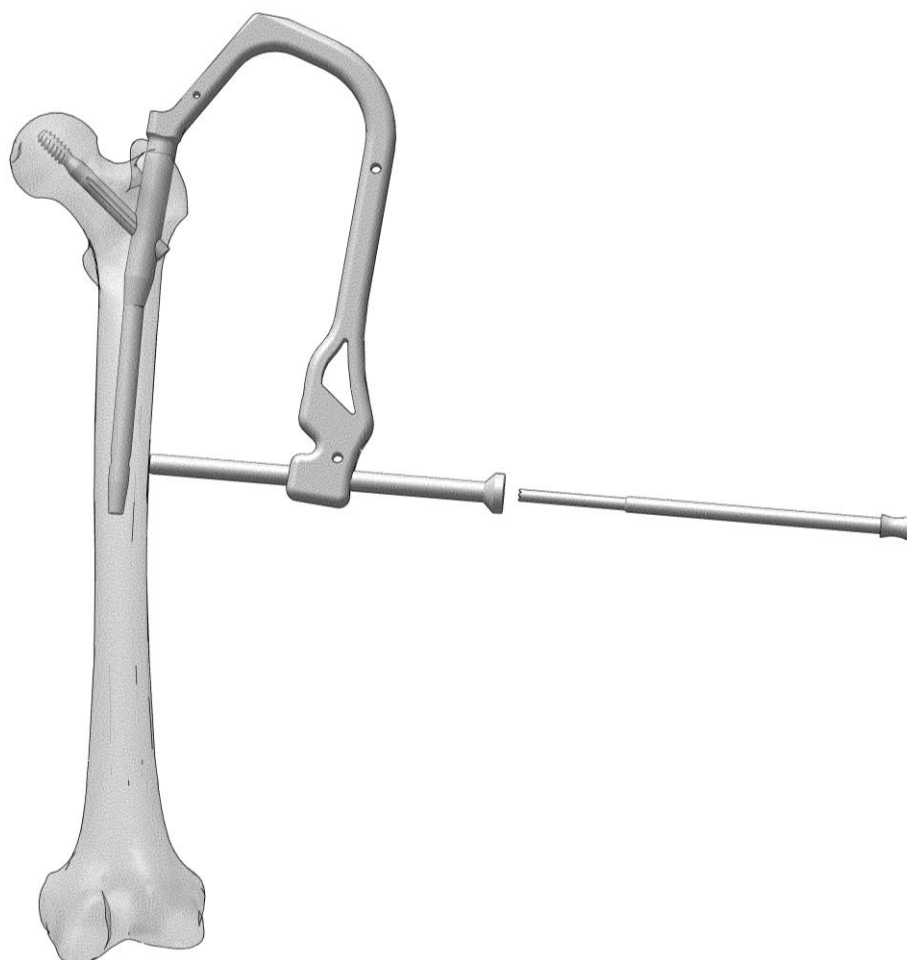

CANULA Ø11mm (91676) | GUIA PARA BROCA (2420) | BROCA Ø3,8x300mm




Bloqueio Distal – medição e fixação com parafuso

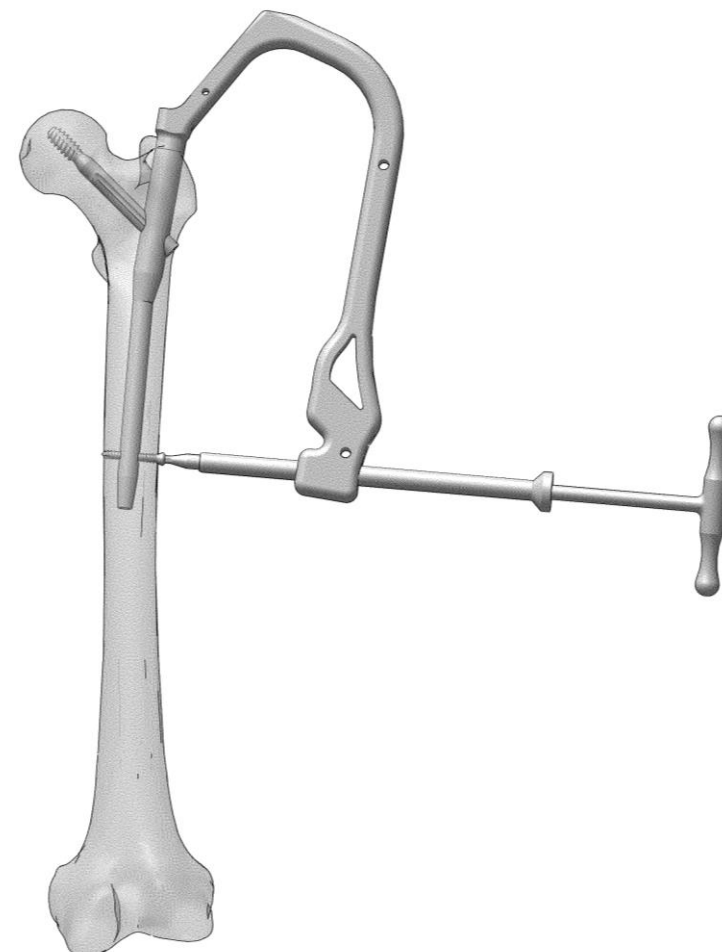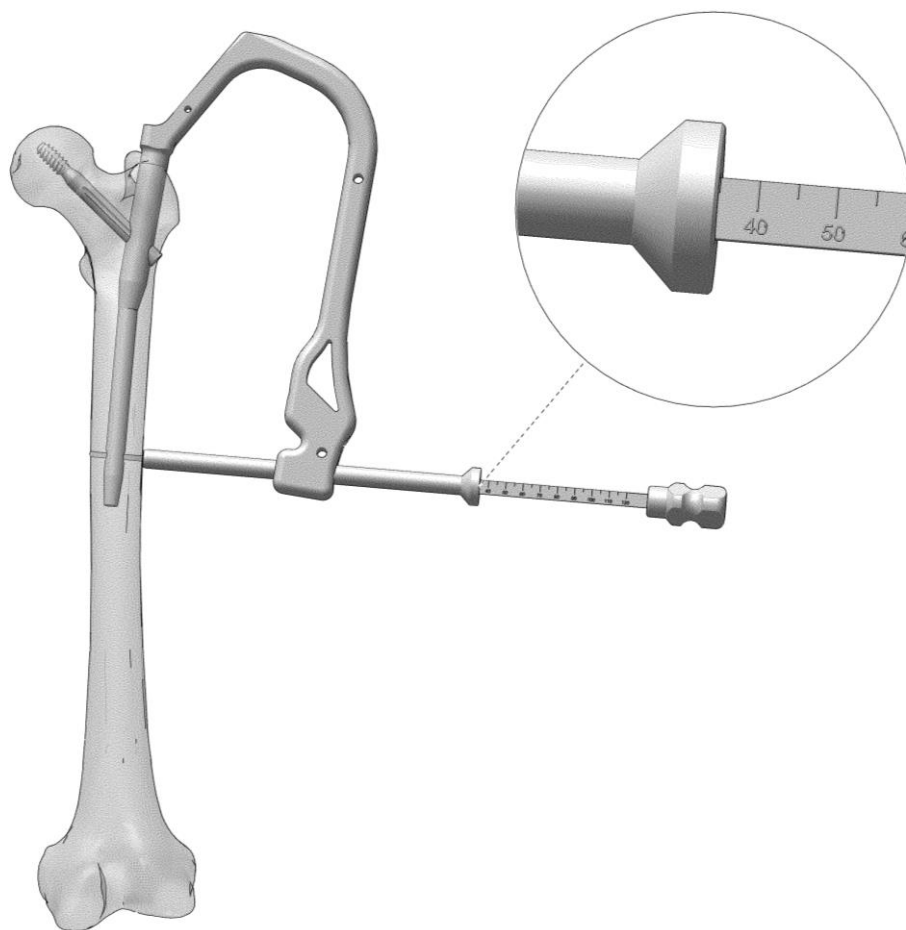

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE (90489) | CHAVE HEXAGONAL SW. 3,5mm (2413)



Remoção da Guia (3100) e colocação do parafuso de cobertura

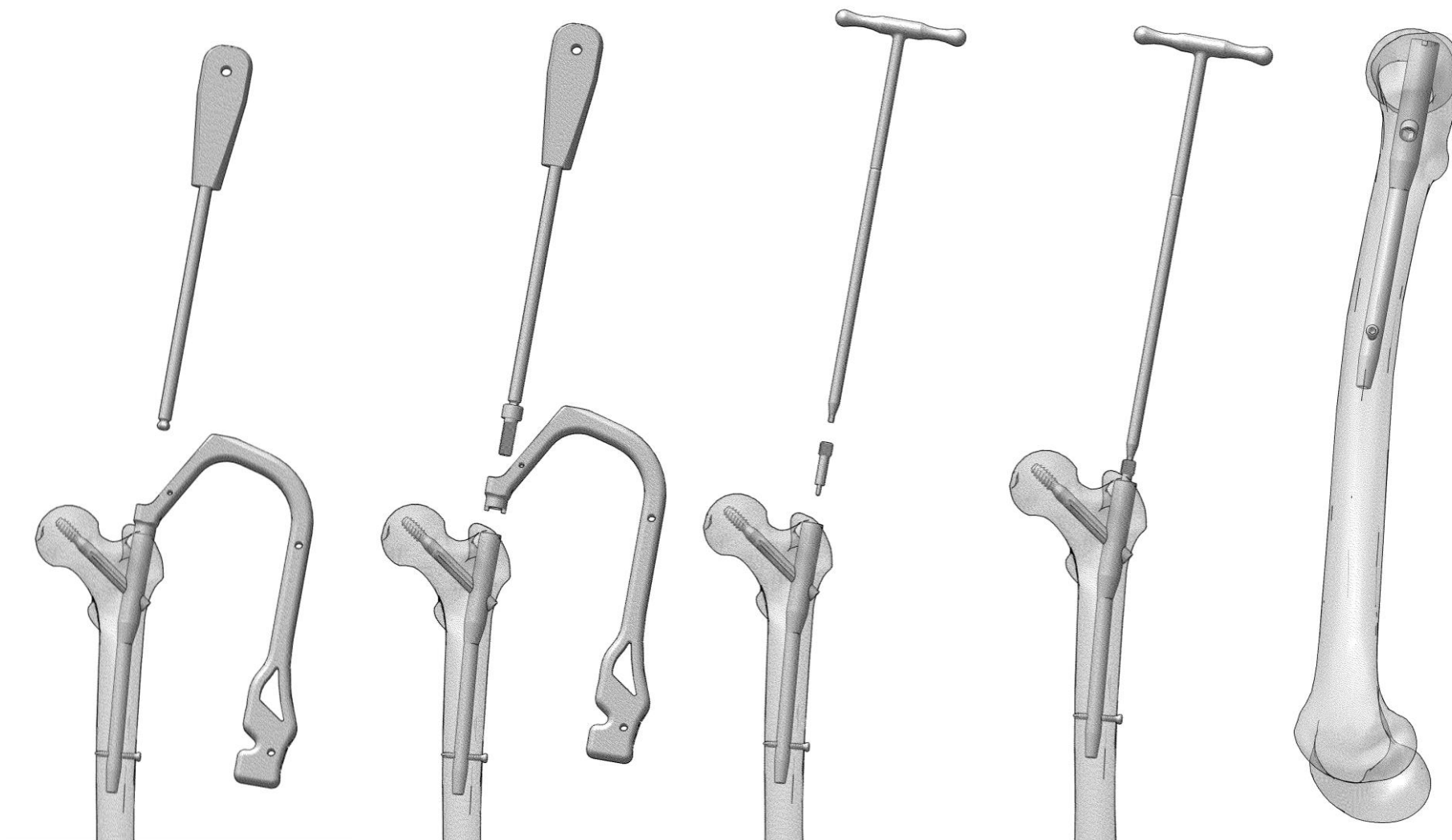

CHAVE HEXAGONAL SW. 8mm (91365) | CHAVE HEXAGONAL SW. 3,5mm (2413)